


## Modo de Empleo Cassette

- 1 Utilice el gotero (incluido) para recolectar la muestra de orina, y aplique todo el contenido en la ranura de muestra.

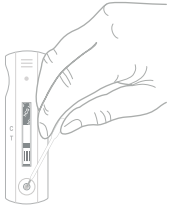


- 2 Lea el resultado después de 3-7 minutos.



5 minutos

## Modo de Empleo Tira

- 1 Introduzca la prueba en una muestra de orina de 5 a 10 segundos.
- 2 Retire la prueba y colóquela en una superficie plana.
- 3 Lea el resultado después de 3-7 minutos.

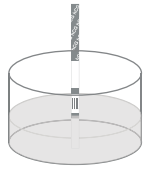

5 minutos

## Información para Pedidos

Catálogo	Producto/Parámetro	Formato	Espécimen
FHC-103	hCG(Embarazo)	Aplicador	Orina
FHC-202	hCG(Embarazo)	Cassette	Orina
FHC-201	hCG(Embarazo)	Tira	Orina



## Acerca de Certum

La marca Certum Diagnostics con un catálogo amplio de productos para el Diagnóstico Rápido de Marcadores de Fertilidad, Drogas de Abuso, Enfermedades Infecciosas y Marcadores Tumorales; es la opción #1 para Clínicas, Laboratorios y Servicios de Salud Ocupacional.

Todos los productos Certum, están fabricados bajo los estándares de fabricación de dispositivos médicos ISO:13485 en plantas de manufactura registradas ante FDA.

## Prueba de Embarazo Certum



La prueba de embarazo Certum es la mejor alternativa para laboratorios de análisis clínicos y consultorios médicos, al ofrecer un alto nivel de sensibilidad y especificidad.

Además de brindar resultados de fácil interpretación en menos de 5 minutos.

## Características de la Prueba



Método Fácil y Práctico



Resultados Rápidos



Confiable



Fácil de Utilizar


## Ventajas y Beneficios



- Método fácil de realizar.
- Alta especificidad y sensibilidad.
- Tiempo de resultados rápidos.
- No requiere equipo Adicional de laboratorio.

## Modo de Empleo Aplicador


- 1 Retire el dispositivo de la envoltura y destape antes de hacer la prueba.

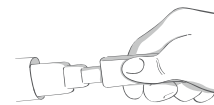

- 2 Sujete el mango y coloque la almohadilla absorbente del dispositivo en el chorro de orina durante 10 segundos.



- 3 Vuelva a poner la tapa y coloque el dispositivo en una superficie plana con la ventana de resultados hacia arriba.

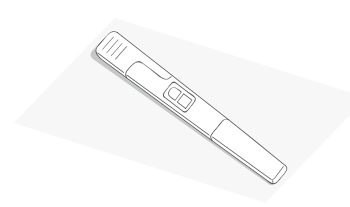

- 4 Espere de 3 a 7 minutos para leer los resultados. No interprete los resultados como definitivos hasta después de 10 minutos.

