



Hepatitis B

Una prueba rápida para la detección cualitativa del antígeno de superficie de la Hepatitis B (HBsAg), en sangre entera, suero o plasma.



CERTUM
DIAGNOSTICS

Acerca de CERTUM

CERTUM es una marca que ofrece una amplia gama de kits de pruebas de diagnóstico innovadores que ayudan a brindar respuestas a los profesionales de la salud.

Los productos **CERTUM** ofrecen precisión, simplicidad y velocidad para el diagnóstico temprano y el monitoreo de afecciones médicas comunes, incluyendo pruebas para la detección de drogas de abuso, embarazo, marcadores cardíacos, marcadores tumorales y pruebas de enfermedades infecciosas entre otros. Los productos de diagnóstico **CERTUM** se usan fuera del cuerpo humano y requieren poco o ningún equipo especial.

***CERTUM** tiene como misión mejorar el bienestar del paciente, reduciendo los costos y tiempos totales de los resultados de exámenes de diagnóstico, manteniendo la calidad y estándares altos esperados por los profesionales de la salud.*

CERTUM tiene una participación de mercado importante en hospitales, laboratorios de referencia, centros de investigación, consultorios médicos, servicios de salud ocupacional y programas de salud pública debido a su precisión, asequibilidad y facilidad de uso.



Certum es una línea de dispositivos de *pruebas rápidas* que ofrece un menú amplio de diagnósticos manufacturados con la mayor calidad y a un precio competitivo.



Acerca de la Prueba Hepatitis B


La Prueba Rápida en Cassette de HBsAg es un inmunoensayo cualitativo y sándwich de dos sitios en fase sólida para la detección de HBsAg en sangre entera, suero o plasma.

La membrana está pre-recubierta con anticuerpos HBsAg en la región de la línea de prueba del cassette. Durante la prueba, la muestra de sangre entera, suero o plasma reaccionan con las partículas recubiertas con anticuerpos anti-HBsAg.




Modo de Empleo

1

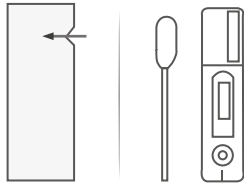


Permita que el sobre alcance temperatura ambiente antes de abrirlo.

2

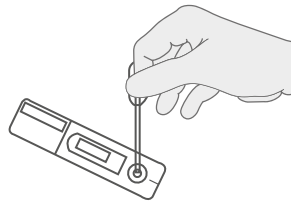


Añada 3 gotas de la muestra de suero/plasma al pocillo.

3

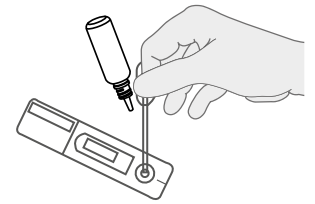


Añada 3 gotas de sangre entera capilar por venepunción y 1 gota del buffer

4

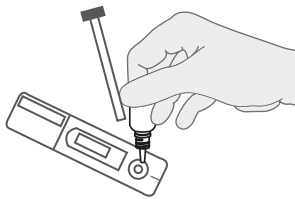

75µl de sangre entera capilar por venopunción y 1 gota de buffer.

5

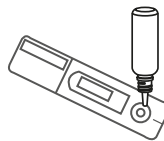

3 gotas de sangre entera capilar por venopunción y 1 gota del buffer.


6



Lea resultados a los 15 minutos. No interprete los resultados después de 30 minutos.

Interpretación de los Resultados


Positivo: Aparecen dos líneas de color distintas. Una línea de color debe estar en la región de control (C) y la otra debe estar en la región de prueba (T).

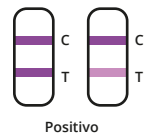


Negativo: Una línea de color aparece en la región de control (C). No hay ninguna línea de color aparente en la región de prueba (T).



Inválido: La línea de control no aparece: El volumen de muestra insuficiente o las técnicas de procedimiento incorrectas son las razones más probables para el fallo de la línea de control. Revise el procedimiento y repita la prueba con un nuevo cassette. Si el problema persiste, deje de usar el kit de prueba inmediatamente y póngase en contacto con su distribuidor local.

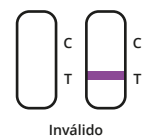

Beneficios de la Prueba

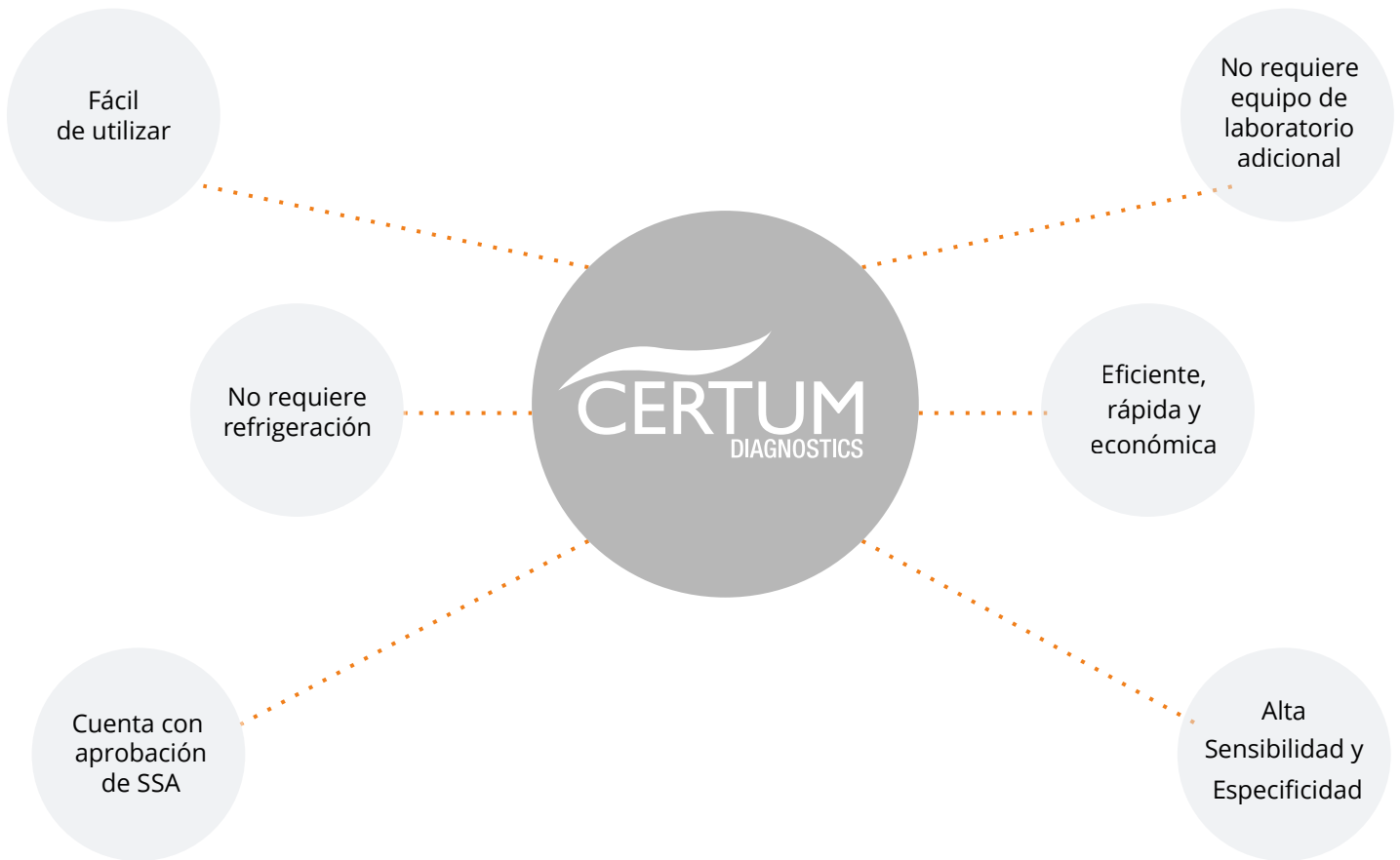

Información para Pedidos

Catálogo	Parámetros	Espécimen	Formato	Presentación
IHBSG-402	Hepatitis B (HBsAg)	Sangre entera / Suero /Plasma	Cassette	Caja con 25

Registro sanitario: **1010R2021 SSA**

CERTUM DIAGNOSTICS

La **aplicación móvil** de la marca que ofrece la más amplia gama de kits de **pruebas de diagnóstico rápido**, ahora disponible para **descarga gratuita**.

