Lancetas Softclix



Reg. No. 1722C2009 SSA

El dispositivo de punción y la lanceta Accu-Chek® Softclix están diseñados para trabajar juntos de manera perfecta. La tecnología Clixmotion®, combinada con el diseño de la lanceta, hace la punción prácticamente indolora.

TECNOLOGÍA CLIXMOTION®: Sin vibración al entrar o salir.

PENETRACIÓN: De 0.8 a 2.3 mm

SEGURIDAD: Cubierta protectora evita lesiones y accidentes.

DIAMETRO DE LA LANCETA: 0.4 mm cubierta de silicón.

Beneficios y características

- Punta esterilizada en forma de diamante y cubierta de silicón
- Disminuyen el dolor de la punción
- Su sistema de punción extrae fácilmente sangre capilar de la yema del dedo.
- Mayor facilidad de uso, cuenta con capuchón de seguridad.
- La avanzada tecnología Clixmotion[®] evita la oscilación de la lanceta y con ello la ruptura innecesaria de tejidos.
- Penetración a gran velocidad con retracción activa de la aguja
- No hay contacto con la lanceta, se podrá insertar y retirar fácilmente sin ningún riesgo

Especificaciones adicionales

Diámetro de la lanceta: 0.4 mm

Calibre: 28

Revestimiento: Silicona

Presentaciones: Caja con 200, 100 y 25 lancetas

Cómo usar el dispositivo de punción Accu-Chek Softclix

El dispositivo de punción Accu-Chek® Softclix es pequeño y fácil de usar, siga los siguientes pasos:

- Retire la tapa inferior. Introduzca una lanceta nueva en el sujetador y empuje hasta que haga clic.
- Retire la cubierta protectora de la lanceta girándola y vuelva a colocar la tapa hasta hacer clic.
- Gire el tapón hasta seleccionar la profundidad de la penetración.
- Pulse el botón superior hasta el fondo. El botón disparador se pone amarillo.
- Presione firmemente el dispositivo de punción en el lateral de la yema de su dedo
- Presione el botón amarillo de liberación
- Después de realizar la medición retire la tapa y deslice el eyector hacia adelante para desechar la lanceta
- Lea atentamente las instrucciones y Consulte a su médico