

Accu-Chek Safe-T Pro Plus



Descripción de artículo

Varias funciones de seguridad combinadas con niveles personalizables que hacen que el dispositivo de punción Accu-Chek® Safe-T-Pro sea particularmente beneficioso. Este dispositivo de punción de un solo uso respalda la seguridad y la facilidad de uso del paciente. También cumple con los requisitos de seguridad establecidos por las autoridades de salud, los autoridades e instituciones de salud.

Uso previsto

Un solo uso. Se obtiene una muestra de sangre capilar de la punta del dedo o, si el paciente es un bebé menor de 1 año, del talón.

Desecho

El dispositivo entero es de un solo uso. Desechar siempre el dispositivo de punción usado en concordancia con los procedimientos de las instalaciones locales para el manejo de desechos, y con las regulaciones sanitarias del país.

PUNCIÓN

En 3 milisegundos

PROFUNDIDAD

1.3; 1.8 y 2.3 milímetros

ESTERILIDAD

Hasta 4 años después de que se esterilizó el dispositivo

USO PREVISTO

Un solo uso. Se obtiene una muestra de sangre capilar de la punta del dedo o, si el paciente es un bebé menor de 1 año, del talón.

DESECHO

El dispositivo entero es de un solo uso. Desechar siempre el dispositivo de punción usado en concordancia con los procedimientos de las instalaciones locales para el manejo de desechos, y

Beneficios y características

- 3 niveles ajustables de profundidad permiten tomar una muestra de sangre según las condiciones de la piel del paciente
- Cada nivel de profundidad queda fijo en el lugar y no puede deslizarse ni salirse de lugar una vez que fue seleccionado
- Corte de aguja y diámetro de aguja especiales y biselados para obtener muestras de sangre en forma prácticamente indolora
- Apto para utilizar en adultos, bebés menores de 1 año y recién nacidos
- Ahorre espacio y costos al utilizar un solo tipo de lanceta
- Diseñado para un solo uso y así evitar la contaminación cruzada
- La tecnología *Safe-T* garantiza que la aguja quede siempre almacenada en el cartucho de manera segura y que no se produzcan pinchazos accidentales
- La retracción automática de la aguja luego de utilizar el dispositivo elimina el riesgo de que se produzcan lesiones y contaminación cruzada
- Luego de realizar la punción, se desecha el dispositivo entero

Especificaciones adicionales

Uso: Un solo uso

Nivel ajustable de profundidad: Sí

Niveles de profundidad de penetración:

Bajo (marca corta) – 1.3mm

Medio (marca media) – 1.8mm

Alto (marca larga) – 2.3mm

Corte especial de la aguja: 3 niveles de corte

Aguja siliconada: Sí

Diámetro de la aguja: 0.63 mm (23 G)

Retracción automática de la aguja: Sí

Un solo uso: Sí

Reconocimiento de dispositivo usado: Sí

Esterilidad:

Hasta 4 años después de que se esterilizó el producto

Modo de uso del dispositivo de punción Accu-Chek® Safe-T-Pro Plus

Prueba sencilla en 3 pasos:

1. Gire la tapa de esterilidad y quítela.
2. El ajustador de profundidad de la penetración está pre-ajustado en el nivel medio. Gire el ajustador de profundidad de la penetración hasta alcanzar la profundidad de penetración deseada. Los 3 niveles de profundidad de penetración son fáciles de identificar ya que presentan una marca corta, otra media y otra larga.
3. Sostenga el dispositivo de punción con los dedos índice, mayor y pulgar. El dispositivo se sostiene cómodamente en sus dedos, ya sea zurdo o diestro. Presione el dispositivo de punción con firmeza sobre el sitio elegido para realizar la punción. Utilizando el pulgar, presione el botón de mando completamente hasta el fondo. Remueva el dispositivo de la zona de punción y deséchelo.